



RICERCA E QUANTIFICAZIONE DELLE CRIOGLOBULINE

Eseguito da:

LABORATORIO ANALISI

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00.

DESCRIZIONE:

valutazione della presenza delle crioglobuline, quantificazione e tipizzazione del criocrito.

ESECUZIONE DEL PRELIEVO

La raccolta del campione di sangue richiede l'uso di **due** provette senza anticoagulanti, mantenute prima e dopo il prelievo a 37°C per almeno 30 minuti fino a completa coagulazione del campione. Il volume minimo di sangue necessario è di 10 mL, un volume inferiore può comportare il rischio di non rilevare crioglobuline presenti.